

2021 年医技大科消毒供应中心（软式内镜） 护士三基考题

（定稿版）

您的姓名：[填空题] *

您的性别：[填空题] *

您的年龄：[填空题] *

您的工龄：[填空题] *

您在消化或呼吸或耳鼻喉内镜室工作的年限？[填空题] *

若您为他科转岗，请选择消毒供应中心或者消化、呼吸、耳鼻喉内镜室工作的原因？[多选题] *

- ☐ 年龄满 55 岁，由医院调配
- ☐ 因生病，处于医院关爱员工调配到供应室
- ☐ 年龄未满 55 岁，自愿申请到供应室由医院调配
- ☐ 年龄未满 55 岁，由医院调配到供应室
- ☐ 年龄未满 60 岁，由于医院后勤转型直接由医院调配

您的学历：[填空题] *

您的职称：[填空题] *

您属于编内还是编外？[填空题] *

您有无手术室工作经历？[填空题] *

您参加过哪些关于消毒供应中心或呼吸、消化、耳鼻喉内镜室的那些规范化知识培训？[单选题] *

- ☐ 专科护士培训
- ☐ 进修学习
- ☐ 1 周以上短期专题学习
- ☐ 上岗前取证必须学习
- ☐ 无

您参加过哪些有关内镜和消毒供应中心的相关知识学习？（小于一周）[单选题] *

- ☐ 科内组织
- ☐ 大科组织
- ☐ 医院组织
- ☐ 市级组织
- ☐ 省级组织
- ☐ 国家级组织
- ☐ 无

您现在在消毒供应中心或呼吸、消化、耳鼻喉内镜室的那些岗位工作？[多选题] *

- ☐ 消毒岗

- ☐无菌室
- ☐一次性物品
- ☐回收、清点岗
- ☐清点、洗涤、包装岗
- ☐洗涤岗
- ☐普通手术组
- ☐腔镜手术组
- ☐眼科手术组
- ☐软式内镜组
- ☐管理组

一、单项选择

内镜清洗用的多酶洗液应多长时间更换 [单选题] *

2h

1h

每清洗 1 条内镜后(正确答案)

一周

内镜采用 2%碱性戊二醛灭菌时，浸泡时间为多少 [单选题] *

30 分钟

15 分钟

1 小时

10 小时(正确答案)

结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后内镜采用2%碱性戊二醛浸泡
消毒时间不少于多少分钟 [单选题] *

30 分钟

15 分钟

45 分钟(正确答案)

20 分钟

经过水洗、擦干后的附件、各类按钮和阀门用多酶洗液浸泡，附件还需在超声清洗器内清洗多

长时间 [单选题] *

10—15 分钟

5—10 分钟(正确答案)

20—30 分钟

30 分钟

内镜用活检钳应达到何种消毒或灭菌水平 [单选题] *

高水平消毒

中水平消毒

灭菌水平(正确答案)

含氯消毒剂消毒

以下哪项是软式内镜清洗消毒标准步骤 [单选题] *

手工清洗→漂洗→测漏→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥→预处理

预处理→测漏→手工清洗→漂洗→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥(正确答案)

测漏→漂洗→手工清洗→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥→预处理

预处理→漂洗→测漏→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥→手工清洗 6、预处理→漂洗→测漏→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥→手工清洗

预处理正确流程是 [单选题] *

擦拭→送水送气→抽吸→盖防水盖→运至清洗室(正确答案)

抽吸→送水送气→擦拭→盖防水盖→运至清洗室

测漏→漂洗→手工清洗→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥→预处理

预处理→漂洗→测漏→消毒（灭菌）→终末漂洗→干燥→手工清洗

使用流动水去除器械、器具和物品表面污物的过程称之为[单选题] *

清洁

冲洗(正确答案)

洗涤

漂洗

灭菌包装材料应符合 GB / T19633 的要求，下列哪项不能作为灭菌包装材料 [单选题] *

硬质容器

纺织品

开放式的储槽(正确答案)

纸塑袋

下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌敷料所需的温度和时间正确的是[单选题] *

121℃， 30 分钟(正确答案)

121℃， 20 分钟

134℃， 4 分钟

132℃， 30 分钟

终末漂洗不应应用哪种水进行冲洗 [单选题] *

- 软水
- 纯化水
- 蒸馏水
- 自来水(正确答案)

一天内进行多次生物监测时 [单选题] *

- 如果生物指示剂为同一批号，则只设一次阳性对照(正确答案)
- 无论生物指示剂是否为同一批号，均只设一次阳性对照
- 即使生物指示剂为同一批号，也要设多次阳性对照
- 无论生物指示剂是否为同一批号，也要设多次阳性对照

过氧化氢低温等离子灭菌的生物监测的指示菌为（ ） [单选题] *

- 枯草杆菌芽孢
- 嗜热脂肪杆菌芽孢(正确答案)
- 两者均可
- 以上都不是

环氧乙烷灭菌的生物监测的指示菌为（ ） [单选题] *

- 枯草杆菌芽孢(正确答案)
- 嗜热脂肪杆菌芽孢
- 两者均可
- 以上都不是

A0 值是评价下列哪项消毒效果的指标 [单选题] *

湿热(正确答案)

干热

环氧乙烷

过氧化氢气体等离子

小型压力蒸汽灭菌器的体积通常 [单选题] *

>60L

<60L(正确答案)

等于 60L

无要求

压力蒸汽灭菌器灭菌植入型器械进行生物监测的频率是 [单选题] *

每批次(正确答案)

每天一次

每周一次

无特殊要求

生物监测需每批进行的有 [单选题] *

压力蒸汽灭菌

干热灭菌

环氧乙烷灭菌(正确答案)

过氧化氢等离子灭菌

软式内镜处理干燥流程中，使用压力气枪，用洁净压缩空气向所有管道充气至少____至其完全干燥

[单选题] *

10S

20S

30S(正确答案)

40S

医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生____以上同种同源感染病例的现象。 [单选题] *

1 例

2 例

3 例(正确答案)

4 例

5 例

内镜清洗消毒及灭菌技术操作指南中规定洗涤用水中纯化水应符合电导率为[单选题] *

$\leq 10\mu\text{s}/\text{CM}$

$\leq 15\mu\text{s}/\text{CM}$ (正确答案)

$\leq 20\mu\text{s}/\text{CM}$

$\leq 20\text{NS}/\text{CM}$

内镜清洗消毒及灭菌技术操作指南中规定清洗槽、清洗工具每天使用后应进行消毒处理，可选用____含氯消毒液。 [单选题] *

500mg/L

1000mg/L(正确答案)

1500mg/L

2000mg/L

灭菌内镜的诊疗环境至少应该达到（）的要求。[单选题]*

清洁环境要求

非洁净手术室要求(正确答案)

洁净手术室要求

万级手术室要求

内镜及器械经过灭菌后应确保达到无菌保证水平[单选题]*

(SAL) 10-3

(SAL) 10-4

(SAL) 10-5

(SAL) 10-6(正确答案)

无菌物品存放架或存放柜距离地面高度、距离墙面距离、距离天花板分别距离应为
[单选题]*

15-20cm、5-10cm、45cm

20-25cm、5-10cm、50cm(正确答案)

25-30cm、5-10cm、50cm

25-30cm、10-15cm、50cm

建立清洗、消毒、灭菌操作的过程记录应具有可追溯性，清洗、消毒监测资料和记录的保存期应≥_____个月，灭菌质量监测资料和记录的保留期应≥_____年。应选（） [单选题] *

- 3月；2年
- 4月；3年
- 5月；3年
- 6月；3年(正确答案)

内镜清洗用纱布应采用（）的方式；清洗刷应（） [单选题] *

- 可复用使用；一用一消毒
- 可复用使用；每天消毒一次
- 可复用使用；每天上下午各消毒1次
- 一次性使用；一用一消毒(正确答案)

包装未受到物理损坏的状态称之为（）。 [单选题] *

- 闭合完好性
- 包装完好性(正确答案)
- 闭合
- 密封

干燥设备进行干燥处理物品适宜的干燥温度，金属类干燥温度（），塑胶类干燥温度（） [单选题] *

- 60℃-90℃；65℃-75℃
- 65℃-90℃；65℃-75℃
- 70℃-90℃；65℃-75℃(正确答案)

75℃-90℃ ; 65℃-75℃

消毒后直接使用的诊疗器械、器具和物品，湿热消毒温度应 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间 ≥ 5 分钟，或 AO 值 $\geq$ （ ）；消毒后继续灭菌处理的，其湿热消毒温度应 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间 ≥ 1 分钟，或 AO 值 $\geq$ （ ）。[单选题] *

2000 ; 300

2500 ; 400

3000 ; 500

3000 ; 600(正确答案)

灭菌包体积要求：下排气压力蒸汽灭菌器不宜超过（ ），脉动预真空蒸汽压力灭菌器不宜超过（ ） [单选题] *

30cm×20cm×25cm ; 30cm×30cm×50cm

30cm×40cm×25cm;30cm×30cm×50cm

30cm×30cm×25cm ;30cm×30cm×50cm;(正确答案)

30cm×10cm×25cm;30cm×30cm×50cm

手术器械采用（ ）包装方法，应由 2 层包装材料分 2 次包装。[单选题] *

闭合式(正确答案)

密封式

粘合剂

热熔法

使用预真空式压力蒸汽灭菌器灭菌敷料和器械所需的温度（ ），时间（ ） [单选题] *

130℃-134℃ ; 2 分钟

131℃-134℃ ; 3 分钟

132℃-134℃ ; 4 分钟(正确答案)

132℃-138℃ ; 4 分钟

环境的温度达到规定要求时，使用纺织品材料包装的无菌物品有效期宜为（）天；未达到环境标准时，有效期宜为（）天。[单选题] *

10;7

12;7

14;10

14,7(正确答案)

对灭菌质量监测通常采用物理监测法、化学监测法和（） [单选题] *

生物监测法(正确答案)

微生物法

ATP 法

荧光标记法

紧急情况灭菌植入型器械时，可在生物 PCD 中加用 5 类化学指示物，5 类化学指示物合格可作为（）的标志，生物监测的结果应及时通报使用部门。[单选题] *

提前放行(正确答案)

灭菌合格

消毒合格

以上都不正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/135332211113011104>