



# 便携式毛发毒品检测仪

## 使用说明书



# 前言

## 适用型号

DH-XIS4020-PDD

## 符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

| 标识                                                                                                | 说明                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <b>危险</b>       | 表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤害。                 |
|  <b>警告</b>       | 表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。             |
|  <b>注意</b>       | 表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。 |
|  <b>防静电</b>     | 表示静电敏感的设备。                                     |
|  <b>当心触电</b>   | 表示高压危险。                                        |
|  <b>激光辐射</b>   | 表示强激光辐射。                                       |
|  <b>风扇警告</b>   | 表示危险运动部件，请远离运动风扇叶片。                            |
|  <b>当心机械伤人</b> | 表示设备部件机械伤人。                                    |
|  <b>窍门</b>     | 表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。                           |
|  <b>说明</b>     | 表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。                         |

## 修订记录

| 版本号    | 修订内容  | 发布日期    |
|--------|-------|---------|
| V1.0.0 | 首次发布。 | 2021.08 |

# 使用安全须知

以下是关于产品的正确使用方法的的要求，为预防危险、防止财产受到损失，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

## 运输和贮存条件

经包装后应贮存在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 93% RH，大气压力（700~1060）hPa，无凝结，无腐蚀性气体和通风良好的环境内。运输过程中应注意防潮、防止冲击以及剧烈振动。

## 仪器使用条件

- 定位和安放要求
  - ◇ 仪器应放置在平稳、水平，无严重粉尘，无阳光直射，无腐蚀性气体存在的室内，工作台面可承载 2.5 kg 以上的重量。
  - ◇ 周围无强烈震动源及强电磁场存在。
  - ◇ 应放置于通风良好的地方，仪器周围应留有 10 cm 以上的空间，保证操作和维护必要的空间。
- 电源电压要求
  - ◇ 该仪器使用 220 V/50 Hz 交流电源，输入电压为直流 12 V，仪器功率为 36 VA。
  - ◇ 使用过程中注意避免发生短路以及触电危险。
- 仪器通过电源适配器连接大地。

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 前言 .....             | I  |
| 使用安全须知 .....         | II |
| 第 1 章 产品概述 .....     | 1  |
| 1.1 产品规格 .....       | 1  |
| 1.2 仪器正常工作条件 .....   | 1  |
| 1.3 产品外观 .....       | 1  |
| 第 2 章 系统组件 .....     | 2  |
| 2.1 产品标准配置清单 .....   | 2  |
| 2.2 配件图片 .....       | 2  |
| 2.3 产品符号说明 .....     | 2  |
| 第 3 章 仪器基本参数 .....   | 3  |
| 第 4 章 产品安装及使用 .....  | 4  |
| 4.1 产品安装 .....       | 4  |
| 4.2 使用步骤 .....       | 4  |
| 4.2.1 仪器设置 .....     | 5  |
| 4.2.2 项目管理 .....     | 12 |
| 4.2.3 单样测试 .....     | 12 |
| 4.2.4 历史记录 .....     | 15 |
| 第 5 章 维护保养 .....     | 17 |
| 5.1 维护保养 .....       | 17 |
| 5.2 维护计划 .....       | 17 |
| 5.3 仪器使用注意事项 .....   | 17 |
| 附录 1 常见问题 .....      | 18 |
| 附录 2 法律声明 .....      | 19 |
| 附录 3 网络安全声明和建议 ..... | 21 |

# 第 1 章 产品概述

## 1.1 产品规格

- 型号/规格：DH-XIS4020-PDD
- 基本尺寸：315 × 226 × 139（长 × 宽 × 高，单位 mm）

## 1.2 仪器正常工作条件

- 环境温度范围：5 °C ~ 40 °C
- 相对湿度范围：不大于 80% RH
- 大气压力范围：700 hPa ~ 1060 hPa
- 电源要求：100~240 VAC, 1.5 A, 50 Hz ~ 60 Hz

## 1.3 产品外观

图1-1 产品外观



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538143101010006136>