

## 微量注射泵的操作规程

### 【目的】

当临床所用的药物必须由静脉途径注入，而且在给药量必须非常准确、总量很小、给药速度需缓慢或长时间恒定


### 【用物准备】

微量注射泵，20ml 或 50ml 注射器 1 付，微量泵延长管 1 根；

### 【操作流程】

- 1、评估病人：了解病情，血管状况，用药情况。
- 2、护士准备：着装整洁，洗手，戴口罩。
- 3、用物准备：微量注射泵，20ml 或 50ml 注射器 1 付，微量泵延长管 1 根
- 4、遵医嘱准备药液并检查，用 20ml 或 50ml 注射器正确配制药液。
- 5、检查并连接微量泵延长管，排气。
- 6、将注射器针筒及活塞柄置于微量泵相应的卡口上并固定。
- 7、将用物携至床旁，核对床号、姓名，解释并取得合作。
- 8、接通电源，打开开关，微量泵进行机内自检至显示屏无闪烁及报警。
- 9、确认显示屏右上方显示 20ml 或 50ml 字样。
- 10、按 F 功能键，设定注射速率，继续按 F 键及 1ml 键，输入注射总量，再次按 F 键恢复速率显示。
- 11、将微量泵延长管与静脉穿刺针相连接，按 START 键，开始注射。
- 12、如需改变注射速率：按 STOP 及 C 键，清除屏上显示的速率，重新输入所需速率。
- 13、如需改变注射总量：按 STOP—>F—>—>1ml—>C 键，重新输入注射总量。
- 14、如需快速注射：不中断注射，按 F 键不放，同时按 BOL 键，此时便开始以 800ml/h 的速率进行快速注射。
- 15、当药液即将注射完毕时，“即将结束”键闪烁并报警，注射继续进行；药液注射完毕，机器自动停止。
- 16、取出注射器，按住电源开关 3 秒关机，切断电源。
- 17、整理用物，洗手并记录。

## 【操作流程】

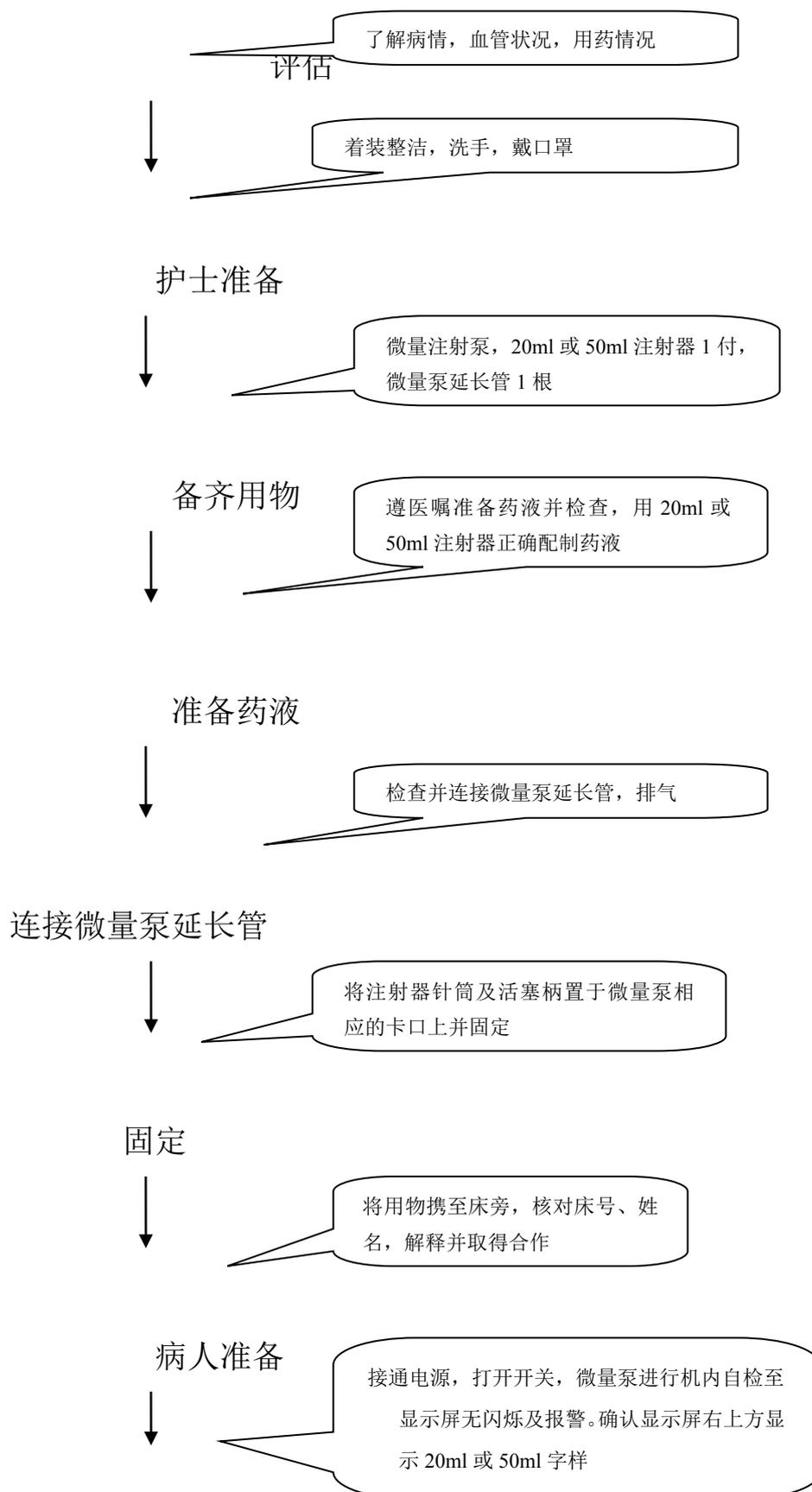

## 开机自检



### 操作

按 F 功能键，设定注射速率，继续按 F 键及 1ml 键，输入注射总量，再次按 F 键恢复速率显示。然后将微量泵延长管与静脉穿刺针相连接，按 START 键，开始注射。



### 调节

如需改变注射速率：按 STOP 及 C 键，清除屏上显示的速率，重新输入所需速率。如需改变注射总量：按 STOP—>F—>—>1ml—>C 键，重新输入注射总量。如需快速注射：不中断注射，按 F 键不放，同时按 BOL 键，此时便开始以 800ml/h 的速率进行快速注射。



### 关机

当药液即将注射完毕时，“即将结束”键闪烁并报警，注射继续进行；药液注射完毕，机器自动停止。取出注射器，按住电源开关 3 秒关机，切断电源。



整理用物，洗手并记录

## 微量注射泵管理制度

- 1、定位放置：微量注射泵定位放置、标识明显，不得随意挪动位置。
- 2、定人保管：有专人负责保管。
- 3、定期检查：
  - (1) 每班专人清点记录，保持性能良好呈备用状态。
  - (2) 护士长及责任人每周检查一次。
- 4、定期消毒：
  - (1) 每日由专人以 75%酒精消毒液擦拭。
  - (2) 微量注射泵表面每次使用后由当班护士清洁、消毒。
- 5、仪器不得随意外借，经相关领导同意后方可出借。
- 6、定期保养：
  - (1) 每日清洁一次。
  - (2) 责任人每周清洁保养一次并记录。
  - (3) 每半年由设备科对仪器进行检查和调试保养，并做好记录。
- 7、使用中微量注射泵出现故障，应立即检查原因，必要时更换微量注射泵，同时通知设备科检修，已坏或有故障的仪器不得出现在抢救室内。

如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载！

## 降温毯操作流程

操作人员洗手，衣着整齐

核对医嘱、携用物至患者身边、查对患者并解释

将降温毯平铺在患者身下，上铺中单，连接接口主机

接通电源

体温设定

停止使用时，关闭电源，取下传感器

将连接管与主机分离，取下降温毯


洗手记录

安置患者，终末处理

## 降温毯管理制度

- 1、定位放置：降温毯定位放置，并定位放置、标识明显，不得随意挪动位置。
- 2、定人保管：各抢救仪器有专人负责保管。
- 3、定期检查：
  - （1）每班专人清点记录，保持性能良好呈备用状态。
  - （2）护士长及责任人每周检查一次。
- 4、定期消毒：降温毯装置使用后及时清洗消毒备用，降温毯仪器表面每日由专人以 75%酒精消毒液擦拭。
- 5、仪器不得随意外借，经相关领导同意后方可出借。
- 6、定期保养：
  - （1）每日清洁一次。
  - （2）责任人每周清洁保养一次并记录。
  - （3）每半年由设备科对抢救仪器进行检查和调试保养，并做好记录。
- 7、使用中的降温毯突然出现故障应立即通知设备科检修，已坏或有故障的仪器标记明显不得出现在抢救室内。


## 电动吸痰器操作流程

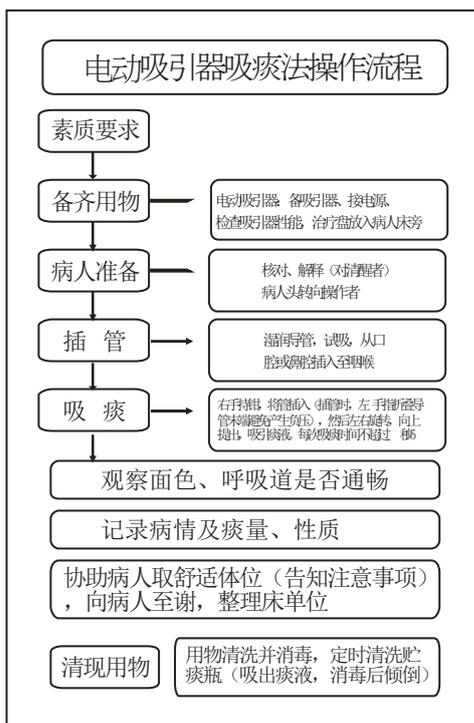

## 吸痰器管理制度

- 1、定位放置：吸痰器定位放置、标识明显，不得随意挪动位置。
- 2、定人保管：各抢救仪器有专人负责保管。
- 3、定期检查：
  - （1）每班专人清点记录，保持性能良好呈备用状态。
  - （2）护士长及责任人每周检查一次。
- 4、定期消毒：
  - （1）每日由专人以 75%酒精消毒液或 500/L84 消毒液擦拭。
  - （2）吸痰器表面每次使用后由当班护士以 75%酒精消毒液或 500/L84 消毒液擦拭。
- 5、仪器不得随意外借，经相关领导同意后方可出借。
- 6、定期保养：
  - （1）每日清洁一次。
  - （2）责任人每周清洁保养一次并记录。
  - （3）每半年由设备科对抢救仪器进行检查和调试保养，并做好记录。
- 7、使用中的吸痰器出现故障，应立即更换吸痰器或改用注射器使用同时通知设备科检修，已坏或有故障的仪器不得出现在抢救室内。

## 输液泵操作流程

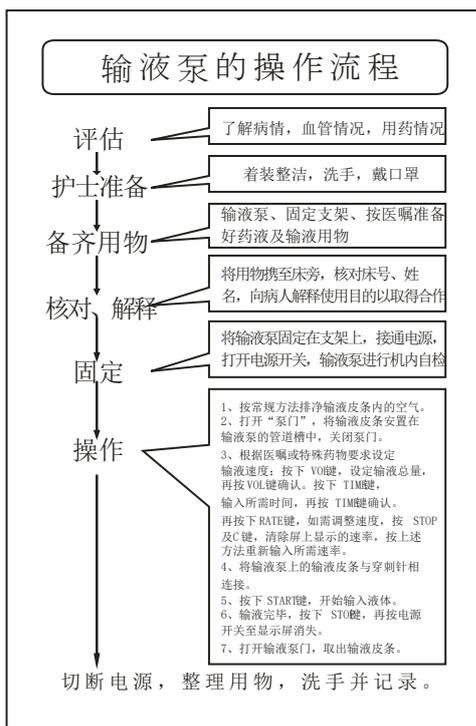

如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/916103204034011001>